



Wie Sie einen handgemachten Messschieber anfertigen, um „E“ zu messen


1. Stellen Sie Ihr Material zusammen: ein flacher Pappkarton, ein Holzlineal oder einen hölzernen Winkel, einen Markierstift und einen Zuschneider oder eine Rasierklinge.

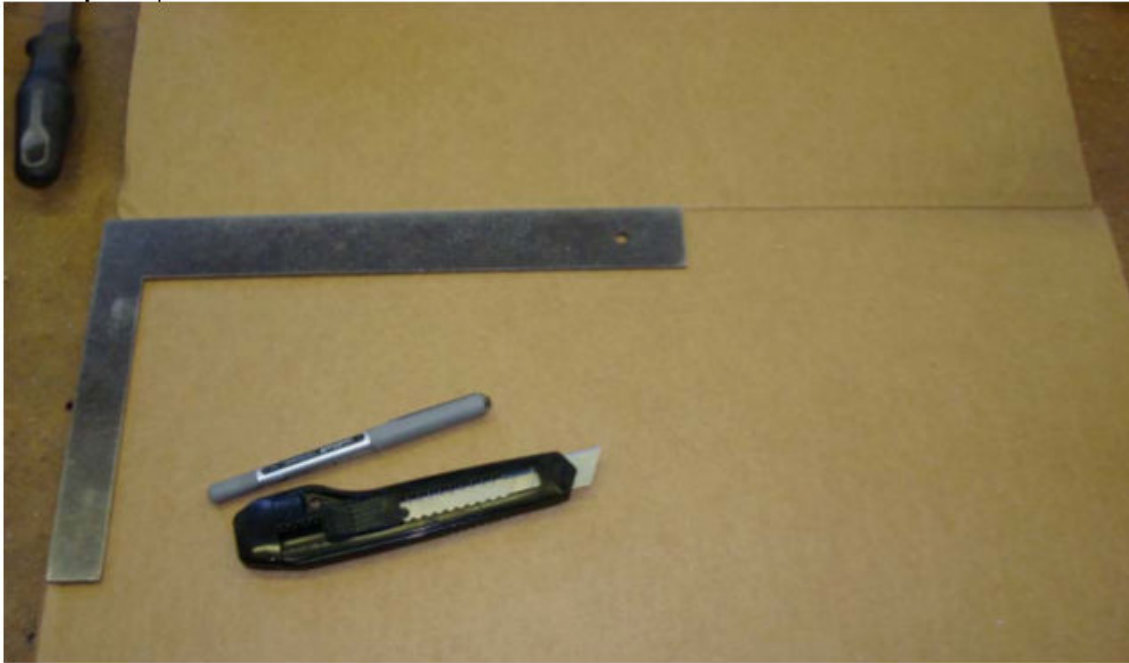


2. Platzieren Sie Ihre gerade Kante entlang des Kartonrandes und deren Ecke und benutzen Sie den Markierstift für die Linie. Machen Sie 2 Skizzen.

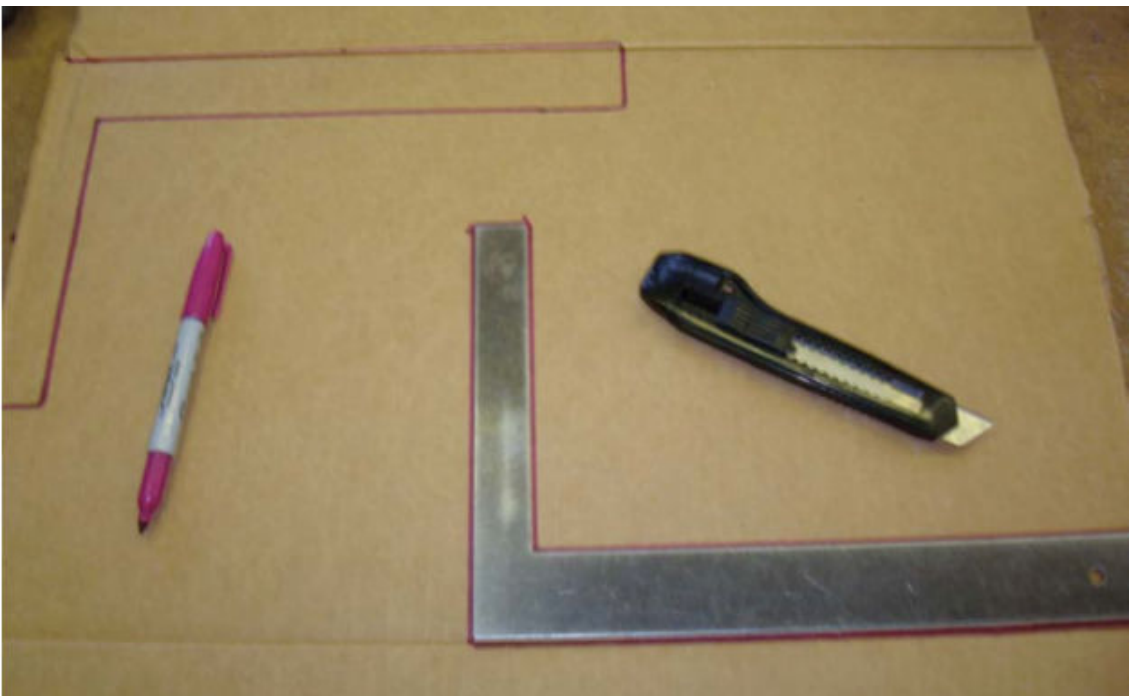


3. Nutzen Sie Ihren Zuschneider um die 2 rechtwinkligen Formen auszuschneiden.

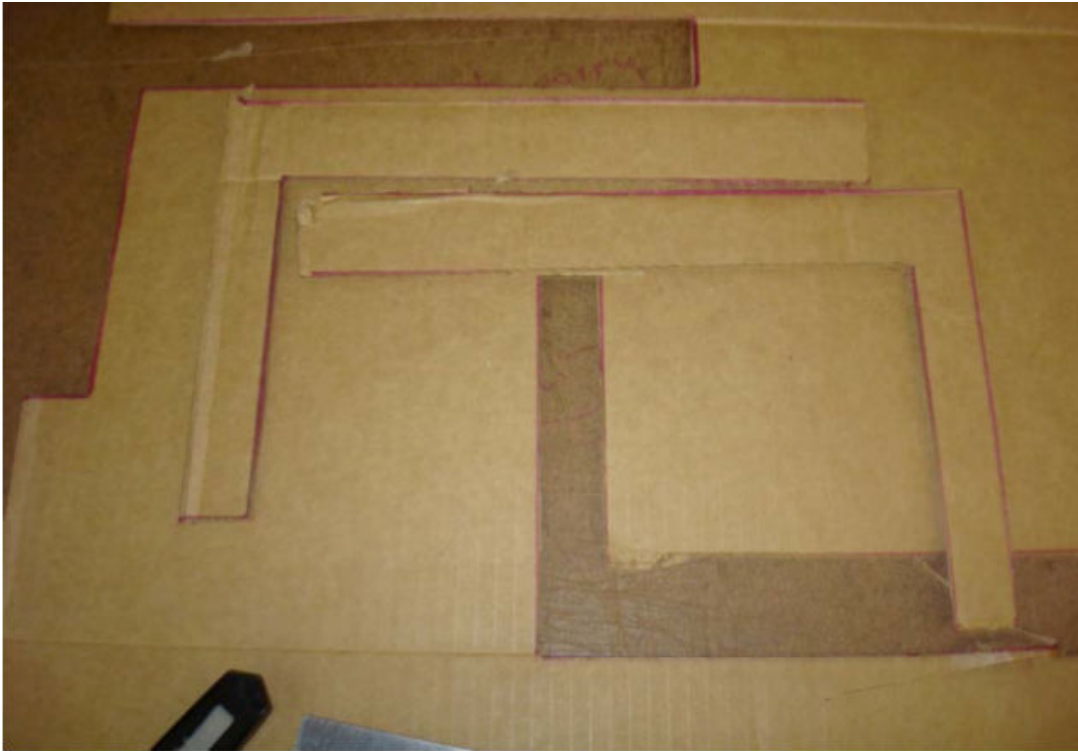

4. Nun haben Sie 2 Arme eines Messschiebers. Befestigen Sie diese mit einer Büroklammer.

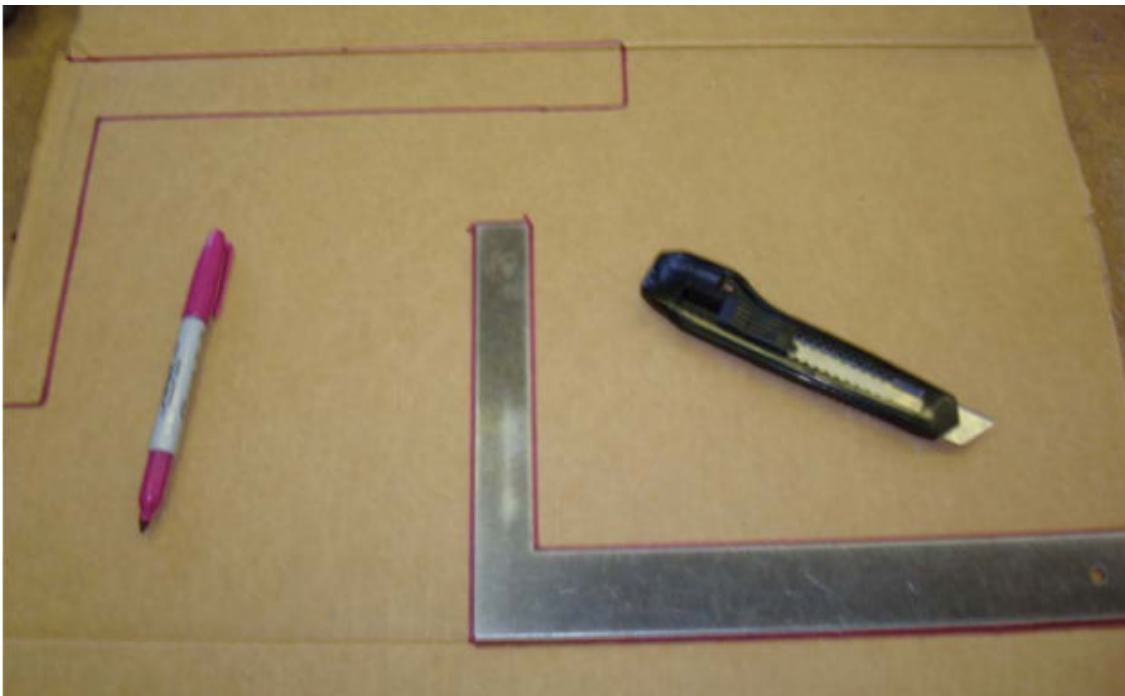

5. Halten Sie den Messschieber über die Schulter des Hundes, sodass die Punkte des Messschiebers leicht den Hund berühren.

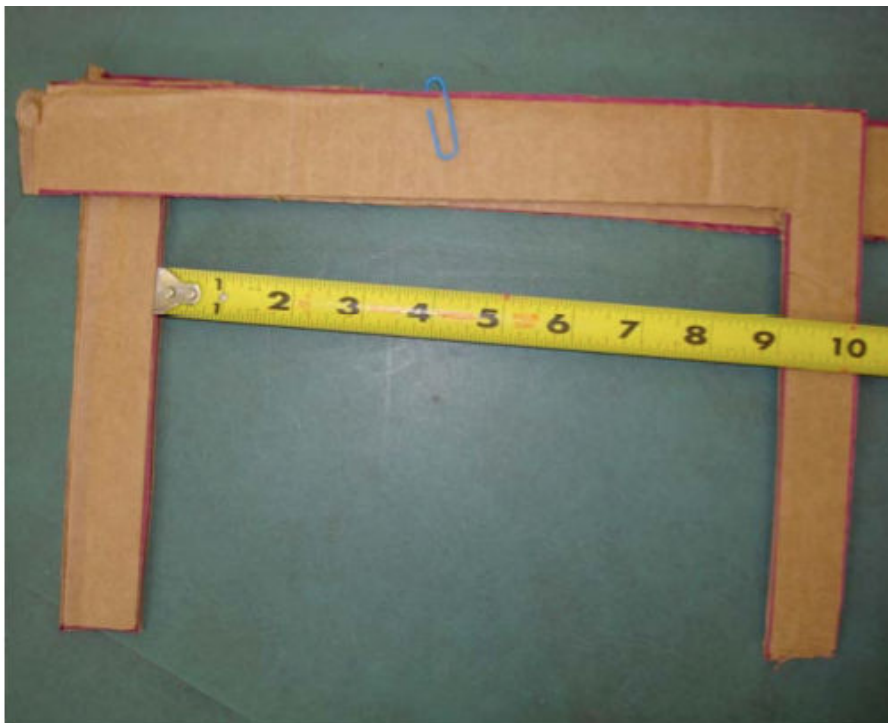

Messen Sie zwischen den Armen des Messschiebers. Wiederholen Sie das an den Rippen und dem Hinterteil.

